



【**產品名稱**】 一次性使用醫用皮膚記號筆。

【**型號**】 分單頭，雙頭兩種。


【**規格**】 產品主要有以下主要型號

產品編號/型號	產品配置
660110	常規筆芯（1mm），不帶直尺
660111	常規筆芯（1mm），帶直尺
660120	極細筆芯（0.5mm），不帶直尺
660121	極細筆芯（0.5mm），帶直尺
660130	雙頭筆芯（1mm,0.5mm），不帶尺
660131	雙頭筆芯（1mm,0.5mm），帶尺

【**產品性能**】 能在人體皮膚上書寫流暢，對人體無毒無害無刺激。

【**主要結構**】 產品由筆身（筆芯、筆尖、筆套、筆帽和筆蓋）、墨水和直尺組成。

筆身結構示意

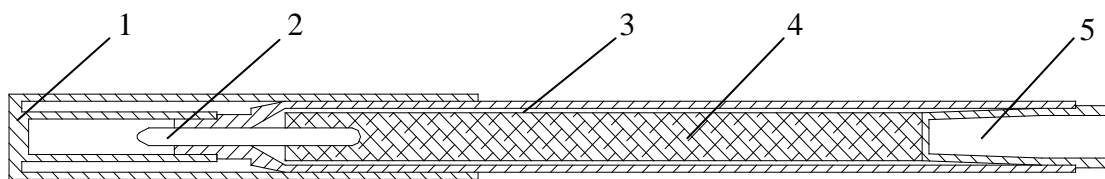

1—筆帽 2—筆尖 3—筆套 4—筆芯 5—筆蓋

【**適用範圍**】 一次性使用醫用皮膚記號筆，目前主要應用于普通外科、整形外科、骨科、神經外科、心血管外科及放射治療等手術中作定位標識。

【**使用說明**】

- 1、先清潔皮膚並使其乾燥；
- 2、然後用皮膚記號筆在皮膚上作記號；
- 3、用碘伏對皮膚進行消毒並固定記號；
- 4、去除記號可用酸性酒精擦除。

### 【注意事項】

- 1、用前應先取得專業醫療指引；
- 2、應考慮患者對龍膽紫的敏感反應；
- 3、單個病人使用；
- 4、包裝破損，嚴禁使用，使用時，考慮皮膚的消毒完全。

【禁忌症】在黏膜和破損皮膚、創面使用時謹慎。

【可能的併發症】暫未發現有任何的併發症現象。

【貯存】器械包應貯存在陰涼、通風、乾燥的地方，防止與腐蝕性氣體接觸。

溫度： $\leq 40^{\circ}\text{C}$

濕度：30~80%

注意防鼠、防蟲、防止包裝破損。

滅菌有效期為二年。

### 【符號說明】



注意，參考隨附文件



切勿再次使用



經輻照滅菌



批次代碼



分類編號



使用期限



製造商名稱



製造日期

【醫療器械生產企業許可證編號】粵東食藥監械登字 2010005 號

【醫療器械註冊證書編號】粵東食藥監械（准）字 2011 第 1010001 號

【產品標準編號】YZB/001-2011

【生產企業名稱】：東莞康鈞醫療用品有限公司

【註冊地址】：東莞市厚街鎮下汴村富民路粵能科技工業城 C4 棟四樓

【生產位址】：東莞市厚街鎮下汴村富民路粵能科技工業城 C4 棟四樓

【聯繫方式】：電話：86-769 8891 9066 傳真：86-769 8891 9050

【售後服務單位】：東莞康鈞醫療用品有限公司

【香港办事处】：康鈞醫療有限公司

【办事处地址】：香港柴灣祥利街 29-31 号，國貿中心 2509 室

【联系方式】：电话：852-2866 6308 传真：852-3542 5676

【電郵】：info@concord-medical.com

【網址】：www.concord-medical.com