

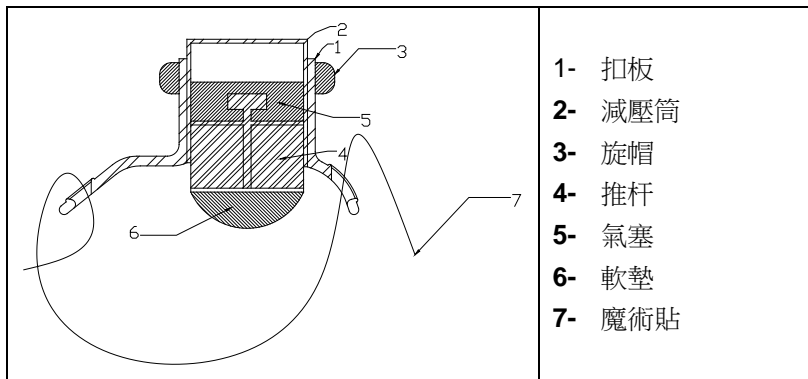


【產品名稱】橈動脈壓迫止血器

【型號規格】成人通用型，適合手腕直徑 140mm 至 240mm

- 【產品性能】
1. 對穿刺部位進行準確的點加壓，阻止血從被穿刺部位噴出
 2. 透明的設計便於在直視下準確地壓住血管
 3. 可以通過對綁帶的鬆緊度和旋帽來調整壓力，使術後壓迫止血操作簡單實用
 4. 筒上色標區顯示壓力，讓醫護人員判斷止血點所承受的壓力大小和壓力舒適度情況
 5. 加壓軟墊採用特殊高分子材料，不需固定患者肢體，從而減輕了患者痛苦
 6. 本品經環氧乙烷滅菌，無菌無副作用

【主要結構】扣板、減壓筒、旋帽、氣塞、軟墊、推杆和魔術貼組成。



【適用範圍】用於介入穿刺手術後穿刺部位的體外壓迫止血。

【使用說明】用前準備：

1. 將穿刺點及周圍擦淨消毒，並用無菌紗布完全擦乾；
2. 撕開滅菌袋，將止血器從袋中取出；

佩戴及使用：

1. 將插在血管內的導管鞘向外拔出至 2~3cm，同時確認有無血管痙攣。如出現明顯的血管痙攣，必須先進行適當的處理。
2. 將軟墊中心點壓在穿刺點後 5mm 處，注意：本產品在左手腕或右手腕使用時，在病人手上的定位不一樣，佩戴時應確保扣板綁帶固定段與病人尾指同側。預佩戴時應將魔術貼（7）穿入扣板（1）對側的固定孔裡並將之固定。
3. 捏住扣板兩端使其向上拱起，壓塊的壓力調節應既利於拔出管鞘又不出血，拔出管鞘後迅速放鬆扣板，使扣板緊貼病人手腕，調節螺帽至合適壓力，確保止血的同时，病人脈搏跳動平穩。

警告：

- 如果有明顯的出血現象，順時針旋轉螺帽加壓直至不再出血。
- 如果病人感到麻木或疼痛，逆時針旋轉螺帽減壓，但需確保穿刺部位沒有明顯的出血現象。
- 在完成以上操作後，檢查橈動脈跟尺動脈的搏動情況確保脈搏明顯跳動。

4. 加壓時間應視導管鞘管徑型號，手術時間，抗凝藥應用劑量綜合確定。解除壓迫時間，一般為 6-8 小時左右。如果注射的肝素少於 2500 個單位，使用該裝置止血器應補少於兩個小時；如果注射的肝素大於 2500 個單位，使用該裝置止血應不少於 4 小時。
5. 過了適當的時間後（根據肝素的劑量來確定），應對該裝置進行減壓。建議可每 45~60 分鐘逆時針旋轉螺帽 0.5~1 圈，達到逐步降壓。如果重新出現出血狀況，應重新調節適當的壓力直至達到止血的目的。後期減壓如通過螺母無法完成，可通過適當放鬆綁帶來達到降壓目的。壓力減小的範圍應以止血效果和病人的舒適度取得平衡為準。
6. 止血完畢，將該產品解除，同時用紗布保護穿刺點 24 小時。

【注意事項】









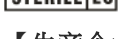
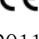
- 1、本產品僅供專業醫務人員使用。
- 2、綁帶太鬆將導致止血器無法正常操作。
- 3、長期維持高壓力可以導致病人局部組織壞死。
- 4、止血過程中應使患者加壓止血部位處於便於觀察的位置。
- 5、使用止血器時要叮囑患者手掌腕部伸直，上肢避免劇烈活動，術後 2 小時內避免做屈腕動作，腕關節應避免活動動 4~6 小時。
- 6、定時觀察以確認穿刺點的止血效果，注意穿刺點局部清潔，避免感染。
- 7、臨床治療時如大量使用肝素，在使用本產品前應進行去肝素化處理。
- 8、止血完畢後，為防止穿刺點意外出血，可攜帶止血器以防意外。
- 9、本產品為一次性使用，用後銷毀。
- 10、本產品經環氧乙烷滅菌，如發現包裝破裂，嚴禁使用。

【禁忌症】 掌深弓和掌淺弓的側支迴圈不完全者禁用。取得專業醫療指示前禁用。

【有效期限】 滅菌有效期三年；超過滅菌有效期禁止使用。

【貯 存】 應在避光、乾燥、防熱的環境下存放。

【符號說明】

	注意，用前參考隨附文件		使用期限
	切勿再次使用		製造商名稱
	分類編號		製造日期
	批次代碼		歐盟代表
	經環氧乙烷滅菌		歐盟證書 CE 0123

【生产企业许可证编号】 : 粵食药监械生产许 20112001 号

【生產企業名稱】	: 東莞康鈞醫療用品有限公司
【註冊地址】	: 東莞市厚街鎮下汴村富民路粵能科技工業區 C 棟四樓
【生產位址】	: 東莞市厚街鎮下汴村富民路粵能科技工業區 C 棟四樓
【售後服務單位】	: 東莞康鈞醫療用品有限公司
【聯繫方式】	: 電話: 0769-88919066 傳真:0769-88919050
【歐盟代表】	: Wellkang Ltd (www.ce-marking.eu) 29 Harley St.,London W1G 9QR,UK
【香港办事处】	: 康鈞醫療有限公司
【办事处地址】	: 香港柴灣祥利街 29-31 号, 國貿中心 2509 室
【联系方式】	: 电话 : 852-2866 6308 传真 : 852-3542 5676
【電郵/網址】	: info@concord-medical.com : www.concord-medical.com